

1. SIDEREA BKL WLAN-VERBINDUNGSVERFAHREN

1. Wifi-Suche starten
2. Anschluss an das Siderea BKL-Netz
3. Passwort eingeben: Faro1948



Die Webseite wird angezeigt, auf der Sie verschiedene Parameter einstellen

- können, z. B: Ein- und Ausschaltzeiten für die gesamte Woche des Umgebungslichts.
- Startzeitpunkt für die gesamte Woche mit entsprechender Zyklusdauer für die BKL-Funktion
- Plattennutzungszähler.
- Zähler für verschiedene Umgebungslichtszenarien.
- Zähler der Desinfektionsstunden.
- Das obere Leuchtmittel kann ein- und ausgeschaltet werden.


So verbinden Sie Sidèrea BKL mit dem Wifi-Netzwerk des Studios

A. Klicken Sie auf **Setup**




Die folgende Seite wird angezeigt: Benutzer: admin
Kennwort admin

B. Klicken Sie auf das Menü oben rechts und wählen Sie "Neuen AP konfigurieren".

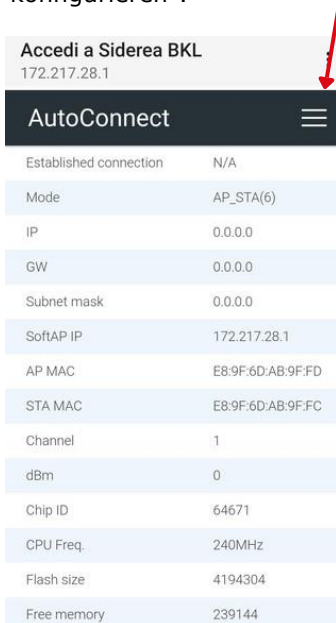

Es erscheint der folgende Bildschirm, auf dem Sie die in der Studie vorhandenen Netzwerke sehen können:

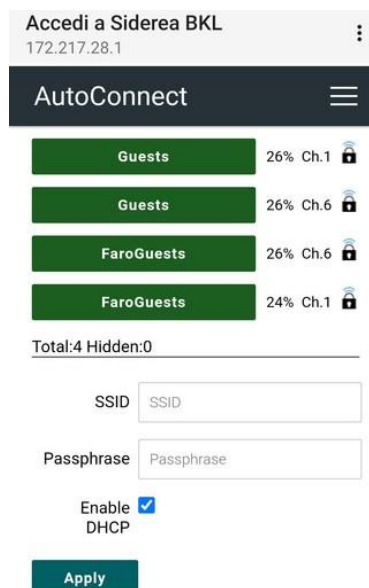

C. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Übernehmen. Das System startet neu und leitet die Seite auf die neue IP-Adresse um, die Sie erhalten haben.

2. STATISCHE IP-


Die Konfiguration einer statischen IP-Adresse ermöglicht es dem Benutzer, die Lampe mit einem vordefinierten Netzwerk zu verbinden

N.B. Es wird empfohlen, diese Tätigkeit von erfahrenem IT-Personal durchführen zu lassen.


A. Klicken Sie auf **Setup**



B. Klicken Sie auf das Menü oben rechts und wählen Sie "Neuen AP konfigurieren".

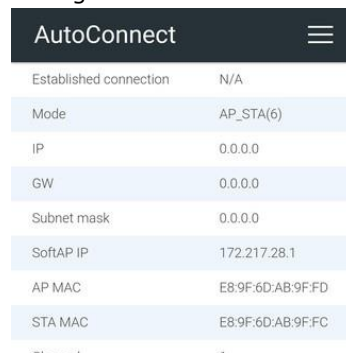

C. Deaktivieren Sie 'DHCP aktivieren'.

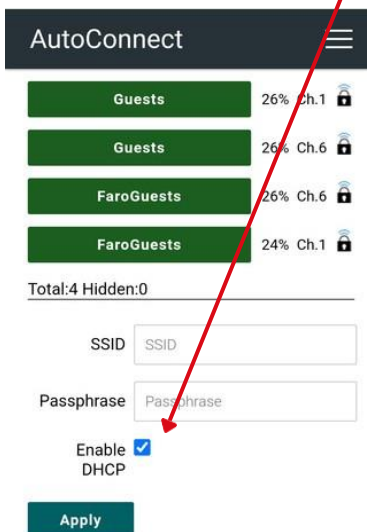

D. Geben Sie auf dem nächsten Bild die erforderlichen Daten ein.

