


1. PROCEDURA DI CONNESSIONE WIFI SIDEREA BKL

1. Avviare la ricerca Wifi
2. Connettersi alla rete Siderea BKL
3. Inserire la password: Faro1948

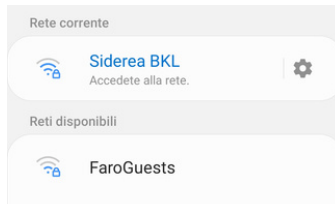

Compare la pagina web in cui è possibile impostare diversi parametri come:

- Orari di on e off per tutta la settimana della luce ambiente.
- Orario di avvio per tutta la settimana con relativa durata del ciclo per la funzione BKL
- Contatori di utilizzo della scheda elettronica.
- Contatori dei differenti scenari della luce ambiente.
- Contatore delle ore di disinfezione.
- Possibilità di accendere e spegnere l'illuminante superiore.

Come connettere Siderea BKL alla rete wifi dello Studio


A. Cliccare su **Setup**




Si arriva alla visualizzazione della seguente pagina:

Utente: admin
Password admin

B. Cliccare sul menù in alto a destra scegliere "Configure new AP"

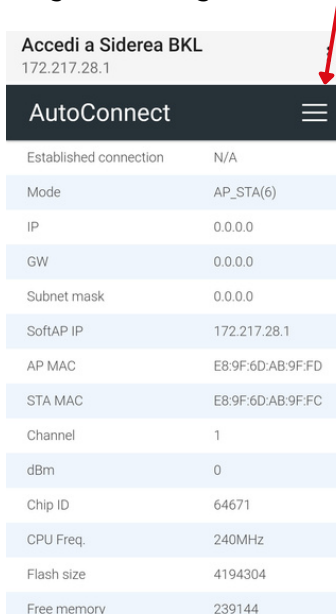

Compare la seguente schermata in cui si possono visualizzare le reti presenti nello studio:

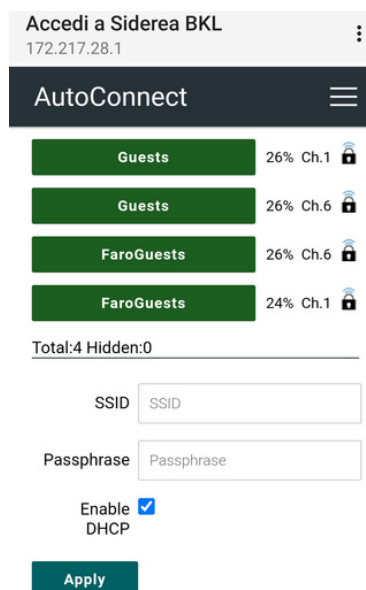

C. Scegliere la rete a cui ci vuole collegare, inserire la password e cliccare su Apply, il sistema si riavvia e reindirizza la pagina sul nuovo indirizzo IP che è stato acquisito.

2. IMPOSTAZIONE IP STATICO


La configurazione di un indirizzo IP statico consente all'utente di connettere la lampada ad una rete predefinita

N.B. Si consiglia di far svolgere questa attività da personale esperto di IT.


A. Cliccare su **Setup**



B. Cliccare sul menù in alto a destra e selezionare "Configure new AP"

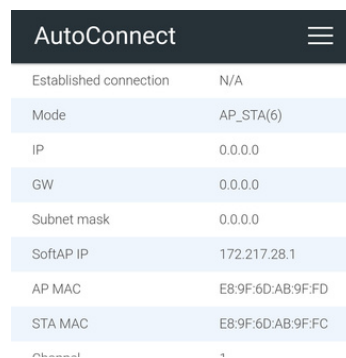

C. Disabilitare "Enable DHCP"

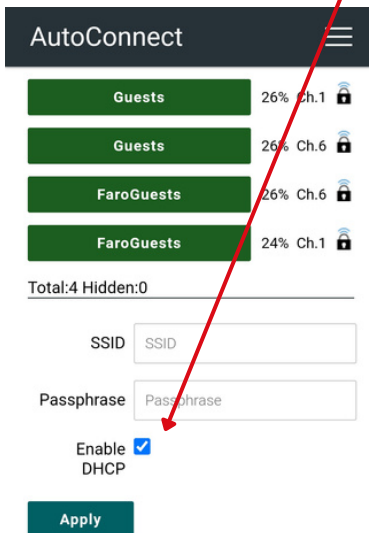

D. Inserire i dati richiesti nella successiva schermata.

