


1. SIDÈREA BKL: PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN WIFI

1. Iniciar la búsqueda de
2. Conexión a la red Siderea BKL
3. Introduzca la contraseña: Faro1948

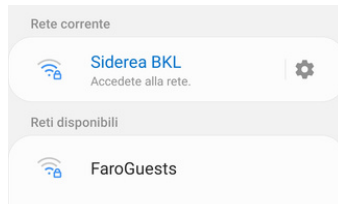

Aparece la página web en la que se pueden configurar varios parámetros como:

- Tiempos de encendido y apagado para toda la semana de la luz ambiental.
- Hora de inicio de toda la semana con la correspondiente duración del ciclo para la función BKL
- ConunTERS de uso del tablero electrónico
- Contadores para diferentes escenarios de luz ambiental.
- Contador de horas de desinfección.
- La iluminación superior se puede encender y apagar.

Cómo conectar Sidèrea BKL a la red wifi del estudio: CONFIGURACIÓN DE IP ESTÁTICA

La configuración de una dirección IP estática permite al usuario conectar la lámpara a una red predefinida.

N.B. Se recomienda que esta actividad sea realizada por personal informático experimentado.

En modo móvil haga clic en → Setup

En modo escritorio:


A. Haga clic en **Configuración**




Aparece la siguiente página:

Usuario: admin - Contraseña: admin

B. Haga clic en el menú superior derecho y elija "Configure new AP"

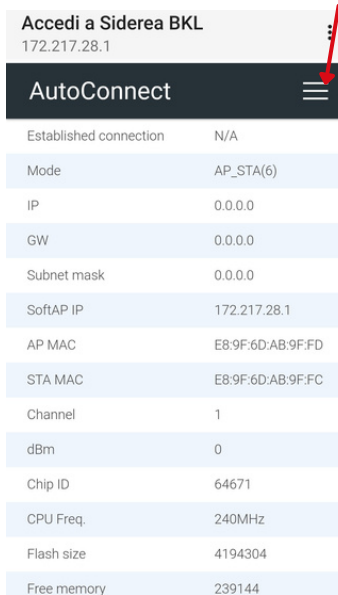

C. Desactivar "Enable DHCP"

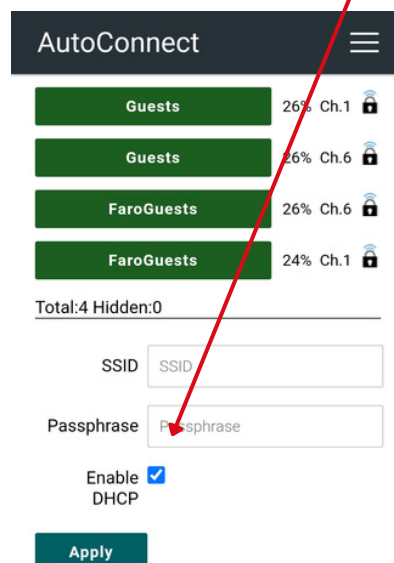

D. Introduzca los datos necesarios en la siguiente pantalla.

