

1. PROCEDURA DI CONNESSIONE WIFI SIDEREA BKL

1. Avviare la ricerca Wifi
2. Connettersi alla rete Siderea BKL
3. Inserire la password: Faro1948



Compare la pagina web in cui è possibile impostare diversi parametri come:

- Orari di on e off per tutta la settimana della luce ambiente.
- Orario di avvio per tutta la settimana con relativa durata del ciclo per la funzione BKL
- Contatori di utilizzo della scheda elettronica.
- Contatori dei differenti scenari della luce ambiente.
- Contatore delle ore di disinfezione.
- Possibilità di accendere e spegnere l'illuminante superiore.

Come connettere Siderea BKL alla rete wifi dello Studio: IMPOSTAZIONE IP STATICO

La configurazione di un indirizzo IP statico consente all'utente di connettere la lampada ad una rete predefinita

N.B. Si consiglia di far svolgere questa attività da personale esperto di IT.

In modalità mobile cliccare su → **Setup**

In modalità desktop:

A. Cliccare su Impostazioni generali



Si arriva alla visualizzazione della seguente pagina:

Utente: admin - Password admin

B. Cliccare sul menù in alto a destra scegliere "Configure new AP"

C. Disabilitare "Enable DHCP"

D. Inserire i dati richiesti nella successiva schermata.

